



## MobileConnect Audiosysteem voor slechthorenden

Als ondersteuning voor slechthorenden zijn de Rabozaal (grote zaal) en de Kleine zaal voorzien van het Sennheiser MobileConnect systeem. Met dit systeem kun je via jouw eigen smartphone en de Sennheiser MobileConnect app het geluid van een voorstelling versterkt weergeven op je gehoorapparaat (indien smartphone en gehoorapparaat beide voorzien zijn van Bluetooth), op je eigen hoofdtelefoon of op je eigen oordopjes. **Let op! Als je gebruik wilt maken van een hoofdtelefoon of oordopjes dien je deze zelf mee te nemen!**

### Hoe werkt het?

1. Download de Sennheiser MobileConnect app uit de [Google Play Store](#), de [Apple App Store](#) of scan onderstaande QR-code met je camera:



*Let op! De volgende stappen kunnen alleen in de zaal worden uitgevoerd.*

2. Verbind de smartphone met de Wifi (met de naam Mobile Connect). Scan hiervoor onderstaande QR-code met je camera:



Dit netwerk is alleen beschikbaar in de zaal en biedt géén verbinding met het internet.

3. Open de MobileConnect app en scan in de app de QR-code van de juiste zaal.


Rabozaal:




Kleine zaal:



*Beeld vanuit de app*

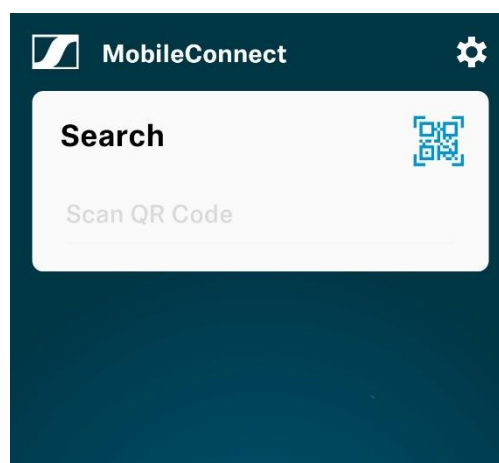

- Zodra je met de zaal bent verbonden zie je onderstaand beeld. Klik op het blauwe oortje om het geluid aan te passen naar jouw persoonlijke wensen.

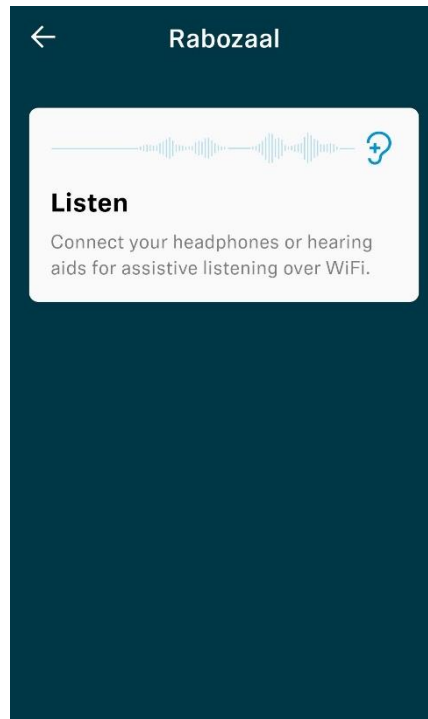

- Verplaats de blauwe stip over het scherm om de klankkleur en het volume aan te passen.

